

Art.Nr. 115**Armstütze**

Armstütze-Innenteil: Folienmaterial	PVC Folie 0,30 mm, weiß DiNP Weichmacher REACH konform
Luftventil	PVC Aufblasventil 5 mm Ø mit freiem Lauf und fest verbundenem Stöpsel
Vlieshülle:	thermisch verfestigtes Polyester-Vlies Hülle aus 100% Baumwollstoff
Armstütze-Bezug:	100% Baumwollstoff

Produktbeschreibung:

Ein Armlagerungskissen mit einem formstabilen aufblasbaren Innenteil, Vlieshülle und Baumwollbezug. Das Kissen reicht von der Achselhöhle bis zu einem Griffwulst für die Hand. Größe ca. 70 x 28 x 8 cm. Gewicht ca. 350 g. Hergestellt in Deutschland.

Handhabung des Produkts:

Der Armstütze-Innenteil mit Vlieshülle und Baumwollbezug wird mit dem Mund oder mit einer passenden Luftpumpe aufgeblasen. Bei der gewünschten Festigkeit, den Ventilkörper mit den Fingern zusammendrücken und den fest verbundenen Stöpsel aufsetzen.

Es wird ein Aufblasventil mit freiem Lauf für schnelles Auffüllen und Entleeren der Luftkammer verwendet. Das Ventil hat keine blockierende Rückschlagfunktion.

Produktpflege:

Reinigen Sie den Armstütze-Innenteil mit einem milden Seifenmittel und Wasser. Für eine allfällige Desinfektion verwenden Sie einen aldehydfreien Desinfektionsreiniger. Keine Lösungsmittel oder scharfe Reinigungsmittel verwenden.

Die Vlieshülle ist in der Waschmaschine mit 40°C waschbar.

Der Armstütze-Bezug ist in der Waschmaschine mit 60°C waschbar.

Stand: 09.12.2024

Änderungen im Rahmen der Produktweiterentwicklung behalten wir uns vor.

Die vorstehenden material- und anwendungstechnischen Angaben über unsere Produkte machen wir aufgrund eigener Prüfung und Erfahrung. Alle Angaben, Hinweise und Empfehlungen erfolgen ohne Gewähr. Schutzrechte Dritter sind gegebenenfalls zu beachten. Unsere Produkte werden in vielen technischen und privaten Bereichen eingesetzt. Die Anforderungen an die Produkte sind daher äußerst unterschiedlich, so dass der Anwender die Eignung unserer Produkte für seinen speziellen Zweck unbedingt selbst prüfen muss.